



RCC205

ROLLSTUHL-ARMLADEHILFE



Der zusammengeklappte falt-Rollstuhl wird in diese Ladehilfe eingehängt und in den Fahrgastraum verladen. Die Rollstuhl-Ladehilfe kann in 5-türigen Fahrzeugen eingebaut werden. Nachdem die Schiebetür die volle Öffnung erreicht, wird die Ladehilfe per Knopfdruck einer mitbeliefernten Fernbedienung aus Fahrzeug herausgefahren, wird der Rollstuhl eingehängt und in kurzer Zeit stabil im Wageninnenraum befördert. Das Fahrzeug muss mit einer Schiebetür oder einer elektrifizierten seitlichen Tür versehen. Diese Vorrichtung verfügt über ein Sicherheitssystem:

- während die Vordertür geschlossen ist, kann die Rollstuhl-Armladehilfe nicht betätigt werden
- wenn ein Hindernis in der Bewegung der Vorrichtung eintritt, hält das Sicherheitssystem ihren Betrieb
 - bei eventueller Störung der elektrischen Anlage kann die Rollstuhl-Armladehilfe manuell geöffnet werden.

Falls diese Ladehilfe nicht verwendet wird, kann man sie leicht entfernen: die originalen Sitze werden einfach wiedereingeführt. Abhängig von Wageninnenraum des Fahrzeugs kann das rechte hintere Sitz bewahrt werden.



EMV-PRÜFUNG
BESTANDEN

